

HDL KOLESZTERIN STABIL FOLYÉKONY
STANDARD
HDL CHOLESTEROL STABLE LIQUID
STANDARD



Kódszám/Catalog No.: 50611H
Kiszerezés/Size: 1x5 ml

Gyártási szám: 7145 #####

Lejáratási idő: ÉÉÉÉ-HH

Felhasználás:

HDL koleszterin reagens kalibrálására szolgáló stabil folyékony HDL koleszterin standard.
Felhasználásra kész.
A standard koncentrációja LOT specifikus.

Koncentráció:

Reagens	Érték	Egység
Koleszterin stabil folyékony reagens (CHOD/PAP)	###	mmol/l
Koleszterin stabil folyékony reagens (ADPS)	###	mmol/l

Visszavezethetőség:

GC-IDMS


Stabilitás:


Felbontás nélkül 2-8°C-on tárolva a lejáratási időig.
Felbontás után 2-8°C-on tárolva minimum 4 hétig.


Figyelmeztetések:

Csak in vitro diagnosztikai célokra használható.
Ne használja a standardet a lejáratási dátum eltelte után!

A címkén a következő szimbólumok találhatóak:

 In vitro diagnosztikai használatra

 Lejáratási idő (a hónap utolsó napja)

 Tárolási hőmérséklet

 Gyártási szám

 Kódszám

Lot No: 7145 #####

Expiry date: YYYY-MM

Preparation:

HDL cholesterol standard for the calibration of HDL cholesterol reagent.
Ready to use.
Concentration is LOT specific.

Concentration:

Reagent	Value	Unit
Cholesterol stable liquid reagent (CHOD/PAP)	#	mg/dl
Cholesterol stable liquid reagent (ADPS)	#	mg/dl

Traceability:

GC-IDMS

Stability:


Without opening at 2-8°C until the expiry date.
After first opening at least 4 weeks at 2-8°C.


Warnings:

For in vitro diagnostic use only.
Do not use after the expiry date!

The following symbols are used on labels:

 For in vitro diagnostic use

 Expiry date (last day of the month)

 Temperature limitation

 Batch Code

 Code